

Hinweise zur Lagerung von Mikrobiologischen Proben außerhalb der Probenannahmezeit

Materialannahme via Rohrpost/Kurier:

Montag bis Freitag: 07:00 bis 18:00 Uhr

Sonn- und Feiertage: 07:00 bis 15:00 Uhr

Material	Lagerungsbedingung	Hinweis
Abstriche	Kühlschrank (max. 8°C)	
Bioptate	Kühlschrank (max. 8°C)	in steriler NaCl-Lösung
Blutkulturen	Raumtemperatur (15-25°C)	Vermeidung von Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung
Liquor zur serologischen Diagnostik	Kühlschrank max. 24 Stunden (max. 8°C)	ggf. Rücksprache mit dem mikrobiologischem Labor
Liquor zur bakteriologischen Diagnostik	Raumtemperatur (15-25°C), binnen 2 Stunden ins Labor!	ggf. Rücksprache mit dem mikrobiologischem Labor
Punktate	Kühlschrank (max. 8°C)	Überführung in Blutkulturflaschen erwägen, Lagerung dann siehe Blutkultur
Respiratorische Materialien	Kühlschrank (max. 8°C)	
Serum/Plasma	Kühlschrank max. 6 Tage (bei max. 8°C)	
Stuhlproben	Kühlschrank (max. 8°C)	
Urinproben	Kühlschrank (max. 8°C)	

In dringenden Fällen und bei Fragen zur Materialentnahme und Lagerung stehen wir Ihnen unterfolgenden Telefonnummern zur Verfügung:

- 15355 Probenannahme
- 15258 Befundauskunft
- 01752240468 diagnostische Notfälle (außerhalb der Probenannahmezeit)